

お客様各位



拝啓

お客様においてはますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

平素より、弊社製品をご愛用いただき心よりお礼申し上げます。

2007年に販売終了致しましたスペースバーナーですが、販売終了から14年が経ち、2018年に点検、修理についても終了しております。本製品は特性上、3年ごとのメーカーによる点検が必要であり、整備が不十分な状態でご使用を続けられますと、ガス漏れや火傷などの重篤な事故を引き起こす可能性が考えられます。

点検後3年を越えてご使用中のユーザー様は、使用を中止頂きますようお願いいたします。

長年ご愛顧頂いております皆様へは、大変ご迷惑お掛けいたします事を心からお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解いただきます様お願い申し上げます。

下記は同封の取り扱い説明書より抜粋

2 1週間毎の点検	
①バーナー受け皿の確認	
・確実に取り付いていること	<input type="checkbox"/>
②炎調節の確認	
・時計回りに回すと炎が大きくなり、3cm以上の長さがあること。	<input type="checkbox"/>
・反時計回りに回すと炎が小さくなり、最後まで回すと確実に炎が消えること。	<input type="checkbox"/>
③エア調整の確認	
・右方向に回すと青色の炎になること。	<input type="checkbox"/>
④本体裏カバーの取り付けネジの確認	
・確実に締め付けられていること	<input type="checkbox"/>
⑤本体全体のがたつき	
・カバーが確実に固定されていること。	<input type="checkbox"/>
・本体全体のがたつきがないこと	<input type="checkbox"/>
⑥ガス漏れの確認	
・ガスの減りが早くなっていないか？	<input type="checkbox"/>
3 交換時期の確認	
ノズルカートリッジの使用期間が3年以内であること (ノズルカートリッジを3年以上使用しますとゴム製のOリングが劣化してガス漏れを起す。火災の危険があります)	
4 メーカー点検	
・本製品には、ゴム製の部品を多数使用しており、長期間ご使用されますと劣化致しますので、3年ごとにメーカーによる点検をお受け下さい。	
・ノズルカートリッジの交換の目安は3年です。	
注意	
☆上記の内容で異常が見つかった場合には、必ずメーカーによる点検修理をお受け下さい。	
☆異常の状態のままご使用を続けると、火災ややけどを負う危険があります。	



敬具

2021年7月吉日

株式会社 モリタ

お問合せ先 お客様相談センター<歯科医療従事者様専用>

T 0800.222 8020 (フリーコール)

2022年11月22日
第22045号


スペースバーナー 使用中止のお願いと廃棄処理についてのご案内

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

第21018号でも案内させていただきましたが、再度、スペースバーナーをご使用のユーザー様へ安全性に関する重要なご案内をさせていただきます。

2007年に販売終了致しましたスペースバーナーですが、販売終了から15年が経ち、2018年に点検、修理も終了しております。本製品は特性上、3年ごとのメーカーによる点検が必要であり、整備が不十分な状態でご使用を続けられますと、ガス漏れや火傷などの重篤な事故を引き起こす可能性が考えられます。

現在ご使用中のユーザー様へ、使用を中止頂きますよう注意喚起をお願い致します。

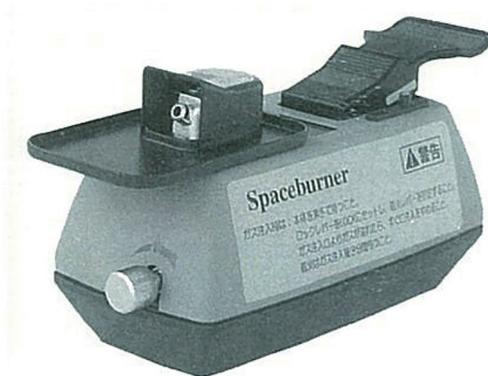

使用中止後の廃棄処理に関しまして、ご案内いたします。

スペースバーナーには内部に水銀スイッチが使用されており、廃棄物処理法に定められた「水銀使用製品産業廃棄物」には該当致しません。廃棄につきましては産業廃棄物処理業者様の指示に従って頂く必要がございます。

そのため、廃棄物処理業者様が水銀の回収が必要と判断された場合は、水銀特有の処分方法と費用を案内される可能性がありますことを、ご案内いただけますようお願い申し上げます。

使用中止のお願いと廃棄処理についてのご案内に、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

●詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。