

ハンドルストッパーのご使用方法について

オートクレーブのハンドルを確実に閉め、運転中にハンドルが動くことを防止します。
運転開始時には必ず写真.2の状態にセットしてください。


ご使用方法



写真.1

ハンドルストッパー

ハンドル

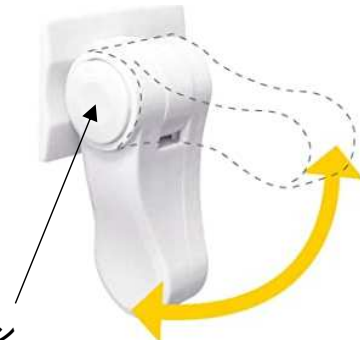

ロック解除ボタン
(押しながら回してください)



写真.2

製品のハンドルを閉めた後に、
ハンドルストッパーを上へ上げてください。

運転終了後は、写真.1の状態に戻してください。

注意事項



写真.3

写真.3の状態では、誤って当たった際に
部品が損傷する可能性があります。